



**TTAF**<sup>®</sup>

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

**UV-C Masaüstü Lambası T-UV-01**  
Kullanım Talimatı



Ürünlerimizi satın aldığınız için teşekkür ederiz.  
Bu ürünü tam olarak anlayabilmeniz ve kurabilmeniz için,  
lütfen ilk kullanımdan önce talimatları dikkatlice okuyun.  
Lütfen kılavuzu okuduktan sonra saklayın.


## Temel Özellikler

- UV-C Masaüstü Lambası T-UV-01, bulunduğu ortamı güçlü UV-C ışınımı ile VİRÜSİDAL (virüs öldürme) etki sağlar.
- 360° Kapsama Alanı: UV-C Masaüstü Lambası T-UV-01, etrafını saran 2 tüp ile VİRÜSİDAL (virüs öldürme) etkisi sağlar.
- UV-C Masaüstü Lambası T-UV-01, hareket sensörü sayesinde 5m mesafeye kadar hareketi algılar. Hareket algılandığında otomatik olarak durur.
- Covid-19 (SARS-CoV-2) (Klinik İzolat) virüs ile kirletilmiş yüzeylerde 100 cm mesafeden 90 dakika uygulandığında %99,99 düzeyinde VİRÜSİDAL (virüs öldürme) etkisi göstermektedir.


## Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: T-UV-01
Çalışma Voltajı	: 200~240VAC 50/60Hz
Güç	: 25W~35W
Işınma Gücü	: 0,89W/m <sup>2</sup> @ 1m
Işık Kaynağı	: UV-C Tüp
Uygulanabilir Alan	: ≤30m <sup>2</sup>
Hareket Sensörü Algı Mesafesi	: ~5m
Kullanma Yöntemi	: Dokunmatik Kontrol
Dış Malzeme	: Anti-UVPC
Diğer Özellikler	: Zamanlama için 3 çalışma modu Odayı terk etmek için gecikmeli işlem


## Çalışma Adımları

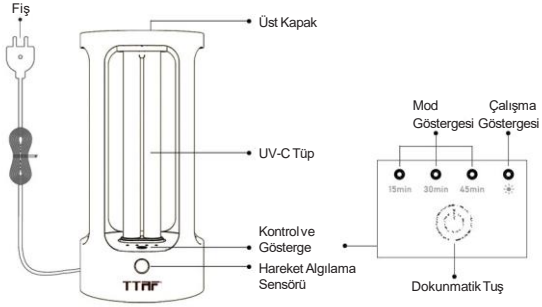

1. Cihazın fişini prize takın.

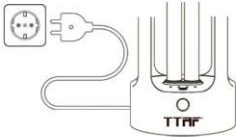


2. Çalışma süresini seçin.

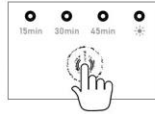

Çalışma süresini seçmek için düğmeye tıklayın.

3. Düğmeye kısa basışlarla dezenfeksiyon süresini belirleyin.

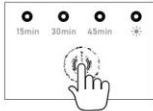


Zamanlama süresini belirledikten sonra, sesli uyarı verene kadar (yaklaşık 3 saniye) düğmeye basın. çalışma göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır

4. Çalışmayı başlatın

İnsanlar 20 saniye içinde odayı terk etmelidir. çalışma işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

5. Çalışma Süreci:

Operasyon sırasında odaya hiçbir insan veya evcil hayvan girmemelidir.

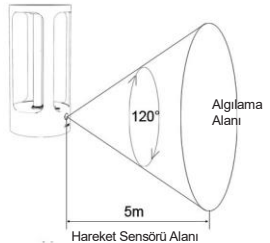



- Kullanma talimatını mutlaka OKUYUNUZ
- Ürün ışığı açıkken veya kapatmadan ürüne MÜDAHALE ETMEYİN,
- Çocuklardan uzak tutunuz, ürün çocuklar tarafından KULLANILMAMALI VE KULLANDIRILMAMALIDIR.
- Ürünü kesinlikle hayvanlar, bitkiler ve insanlar üzerinde KULLANMAYINIZ.
- Ürün çalışırken ışıklarını kontrol etmek için çıplak gözle doğrudan BAKMAYINIZ.
- Covid-19 (SARS-CoV-2) (Klinik İzolat) virüs ile kirletilmiş yüzeylerde 100 cm mesafeden 90 dakika uygulandığında %99,99 düzeyinde VİRÜSİDAL (virüs öldürme) etkisi göstermektedir.
- Cihaz yere düşme, kırılma, doğal afette zarar görme ya da herhangi bir darbeye maruz kalma durumları ile karşılaştığı zaman ürünün parçacıklarına el sürülmeden ve teneffüs edilmeden atıkları dikkatli bir şekilde fırça yardımı ile toplanarak poşete konulmalı ve alan havalandırılmalıdır.
- **20 01 21** kodlu (Floresan Lamba ve Diğer Civa İçeren Atıklar) atık kutusu oluşturularak diğer atıklardan ayrılması gerekmektedir.
- Cihazın/sistemin her iki ayda bir teknik kontrolleri yapılır. UV-C tüpün kullanım ömrü 8000 saattir. UV-C tüp değişimi için firmamızdan teknik destek almanız gerekmektedir. Teknik destek için; [teknikdestek@ttaf.com.tr](mailto:teknikdestek@ttaf.com.tr)
- Tehlikenin ana kaynağı tüplerde bulunan civa buharıdır. Tüp kırıldığı zaman hemen buharlaşır. Tüp başına 3 mga kadar civa kullanılmıştır.

## Dikkat



- Güç açıksa ancak ışık çalışmıyorsa, lütfen elektrik fişinin güç kaynağına doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz.
- Lütfen bu ürün için doğru giriş voltajını seçiniz.
- Lütfen ürünü sabit olmayan, yanıcı ve nemli yerlerde kullanmayınız.
- Bu üründe anormal bir durum olduğunda, hemen güç kaynağını kesiniz ve firmamıza başvurunuz.
- Elektrik çarpmasını önlemek için yüksek voltajlı AC fişini nemli veya ıslak bir yere koymayınız.
- Cihazın/sistemin her iki ayda bir teknik kontrolleri yapılmalıdır. UV-C tüpün kullanım ömrü 8000 saattir. UV-C tüp değişimi için firmamızdan teknik destek almanız gerekmektedir. Teknik destek için; [teknikdestek@ttaf.com.tr](mailto:teknikdestek@ttaf.com.tr)



Kavaklı Mh. İstanbul Cd. No:21  
Beylikdüzü -İstanbul /TÜRKİYE

Tel : +90 212 855 82 20 (Pbx)  
Fax : +90 212 855 82 21

[www.ttaf.com.tr](http://www.ttaf.com.tr)

