

## Çalışma Adımları

1. Cihazı prize takın.
2. Dezenfeksiyonun başlaması için cihaza yaklaşın, cihaz sizi algıladığı zaman yanan yeşil ışık ile aydınlanmış dezenfeksiyon hücrelerine ellerinizi sokun.
3. 15 saniye sonra hücredeki ışık sarı olduğunda ve uyarı sesi geldiğinde ellerinizi çıkartın.
4. Dezenfeksiyon hücrelerinde sürekli yanıp sönen kırmızı ışık dezenfektan sıvısının bittiği anlamına gelmektedir.
5. Dezenfektan sıvısı bittiği durumda cihazın arkasında alt tarafında bulunan kapağı kendinize çekin.
6. Dezenfektan sıvısı deposunun kapağını açın, sıvıyı depoya boşaltın ve tekrar kapağı kapatın.
7. Buhar çıkışını sağlayan borunun yerleştiğinden emin olun.

## Paket İçeriği

- I. Dezenfeksiyon Standı
- II. Güç Kablosu

## Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: T-BHR-01
Çalışma Voltajı	: 220VAC 50Hz
Güç Tüketimi	: 48W
Maksimum Buhar Çıkışı	: 600-1000 ml/s
Sterilizasyon Süresi	: 15sn
Uzaklık Sensör Mesafesi	: 50cm
Ölçüler	: 515mm*350mm*1580mm
Depo Kapasitesi	: 15L
Ağırlık	: 23kg

Bu değerler referans sıvısına göre belirlenmiştir. Kullanılan dezenfektan sıvısına göre değişiklik gösterebilir.

## Temel Özellikler

- TTAF Buhar Etkili El Dezenfeksiyon Standı, bakteri ve virüslerin hızla yayılma olasılığı olan tüm ortak alanlarda herhangi bir temas gerektirmeden el dezenfeksiyonu sağlar.
- Dezenfektan sıvısı özel bir teknolojiyle soğuk buhara dönüştürülerek deriye daha iyi nüfuz etmesi sağlanır.
- Dezenfektan 15 saniye içerisinde ellerin her noktasına yoğun soğuk buhar halinde ulaşır.



## BUHAR ETKİLİ EL DEZENFEKSİYON STANDI KULLANMA KILAVUZU



Kavaklı Mh. İstanbul Cd. No:21  
Beylikdüzü -İstanbul /TÜRKİYE  
Tel : +90 212 855 82 20 (Pbx)  
Fax : +90 212 855 82 21  
www.ttafmedikal.com

© f in /ttafelectronic