



TTAF®

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

UV-C RAGNAR
RGN-07
KULLANIM KILAVUZU



Ürünlerimizi satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu ürünü tam olarak anlayabilmeniz ve kurabilmeniz için,
lütfen ilk kullanımdan önce talimatları dikkatlice okuyun.
Lütfen kılavuzu okuduktan sonra saklayın.

Temel Özellikler

- UV-C ışınları ve ozon sayesinde etkili sterilizasyon sağlar.
- Ayarlanabilir Sterilizasyon süresi:5 mod ve User Modu
- Ayarlanabilir UV-C Tüp Açısı: 0-180°.
- UV-C Dezenfeksiyon Armatürü, hareket sensörü sayesinde 5m mesafeye kadar hareketi algılar. Hareket algılandığında sterilizasyon otomatik olarak durur.

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: RGN-07
Çalışma Voltajı	: 220~240VAC 50/60Hz
Güç Tüketimi	: 150W Pf: 0,98
Işık Kaynağı	: UV-C Tube
UV Dalga Boyu	: 254nm
Işıma Gücü	: 1,5W/m ² @1m
Hareket Sensörü Algı Mesafesi	: ~5m
Ölçüler	: 300x345x1130mm
Ağırlık	: 22kg

Çalıştırma Talimatları

1. Cihazı prize takın.
2. Kapağı açın ve UV-C Tüpü sterilizasyon için gerekli konumda ayarlayın. 0° ile 180° arasında dişlilerle tüpü sabitleyiniz.
3. Zamanlayıcı ile sterilizasyon süresini ayarlayın. Zamanlayıcı içerisindeki modlardan süre seçilebilir ya da "User Modundan" istenen süre ayarlanabilir. Süre ayarlamak için Zamanlayıcı Kullanımı kısmını okuyunuz.
4. Süre ayarlandıktan sonra On/Off butonuna basınız ve sterilizasyon işlemi başlatınız. Sterilizasyon işlemi 30 saniye sonra başlayacak. 30 saniye içerisinde odayı terk ediniz.
5. Sterilizasyon işlemi başlattığınızda kırmızı uyarı ışığı yanıp sönecek. LCD ekran üzerinde kalan süre yazacak.
6. Sterilizasyon işlemi tamamlandığında LCD ekran üzerinde "Process Finished" yazacak.
7. Sterilizasyon işlemi sırasında hareket algılanırsa, sterilizasyon işlemi duracak ve LCD ekranda "MOVEMENT DETECTED ve T. Left " yazacak. Tespit edilen hareket kısa süreli ve devamlı değilse sterilizasyon işlemi devam edecek. Kısa süreli hareket 3 defa algılanırsa, sterilizasyon işlemi duracak.
8. Sterilizasyon işlemi başladıktan sonra durdurmak için On/Off butonuna basınız. On/Off butonuna bastıktan sonra LCD ekranda "Process Stopped" yazacak.
9. Sterilizasyon işlemi tamamlandıktan sonra cihazı prizden çıkartınız.
10. Dişlileri serbest konuma getirmek için UV-C tüpü dişlilerin sonuna kadar hareket ettirin. Bu işlemden sonra tüpü tutarak ilk konuma getiriniz.
11. Tüpü süngerlerin arasına yerleştirin ve cihaz kapağını kapatın.
12. Dezenfeksiyon sonrası ortamı havalandırmanız tavsiye edilir.

Zamanlıyıcı Kullanımı

1. Cihaz fişe takıldığında LCD ekranda son seçilen zaman yazacak.
2. UP- DOWN tuşları ile hareket edin ve istenen modu seçmek için On/Off butonuna basınız. Bu işlemden sonra seçilen süre LCD ekranda görünecek. Örnek: Mode 1: 15 dakika seçerseniz LCD Ekranda "Selected 15 Min." yazacak.
3. Farklı bir süre eklemek için user moduna gidiniz ve Up-Down tuşlarına aynı anda 3 saniye basınız. LCD Ekranda "Change The Time" yazdığı anda Up-Down tuşlarıyla süreyi azaltıp arttırabilirsiniz. Ayarlanan süreyi seçmek için On/Off butonuna basınız.
4. Süre ayarından sonra sterilizasyon işlemini başlatmak için tekrardan On/Off butonuna basınız. On/Off butonuna bastıktan 30 saniye sonra sterilizasyon işlemi başlayacak. LCD Ekranda gerisayım başlayacak.
 - Mode 1: 15 dk.
 - Mode 2: 30 dk.
 - Mode 3: 45 dk.
 - Mode 4: 60 dk.
 - Mode 5: 90 dk.
 - Mode USER: Kullanıcı istediği süreyi ayarlayabilir.



UYARILAR



1. Kesinlikle alıřtırma talimatlarına bakınız.
2. Ürünü sökmeyin veya kendi başınıza herhangi bir parayı deęiřtirmeyin.
3. Dezenfeksiyon sürecinde UV ışınımdan kaçınmak için lütfen insan, hayvan ve bitkileri alandan uzaklařtırdığınızdan emin olun.
4. Gözlerinize ve cildinize zarar vermemek için lütfen alıřırken ışığa bakmayın. UV-C ışınlarına maruz kalmak hem hayvan hem de insan saęlığı için son derece zararlıdır. Kalıcı rahatsızlıklara neden olabilir.
5. Ürüne arpmayın veya düşürmeyin, aksi takdirde ürüne veya lamba tüpüne zarar verebilir.
6. Cihaz yere düşme, kırılma, doęal afette zarar görme ya da herhangi bir darbeye maruz kalma durumları ile karřılařtığı zaman ürünün paracıklarına el sürülmeden ve teneffüs edilmeden atıkları dikkatli bir řekilde fıra yardımı ile toplanarak pořete konulmalı ve alan havalandırılmalıdır. **20 01 21** kodlu (Floresan Lamba ve Dięer Civa İeren Atıklar) atık kutusu oluşturularak dięer atıklardan ayrılması gerekmektedir.

Dikkat



1. Gü açıkrsa ancak ışık alıřmıyorsa, lütfen elektrik fiřinin gü kaynağına doęru řekilde baęlanıp baęlanmadığını kontrol edin.
2. Lütfen bu ürün için doęru giriř voltajını seçin.
3. Lütfen ürünü sabit olmayan, yanıcı veya nemli yerlerde kullanmayın.
4. Bu üründe anormal bir durum olduęunda, lütfen hemen gü kaynağını kesin ve firmamıza bařvurun.
5. Elektrik arpmasını önlemek için yüksek voltajlı AC fiřini nemli veya ıslak bir yere koymayın.
6. UV-C tüpün kullanım ömrü 13000 saatten fazladır.

teknikdestek@ttaf.com.tr



Kavaklı Mh. İstanbul Cd. No:21
Beylikdüzü -İstanbul /TÜRKİYE

Tel : +90 212 855 82 20 (Pbx)

Fax : +90 212 855 82 21

www.ttafmedikal.com

    /ttafelectronic