



TTAF[®]

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

UV-C RAGNAR
RGN-03
KULLANIM KILAVUZU



Ürünlerimizi satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu ürünü tam olarak anlayabilmeniz ve kurabilmeniz için,
lütfen ilk kullanımdan önce talimatları dikkatlice okuyun.
Lütfen kılavuzu okuduktan sonra saklayın.

Temel Özellikler

- UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatürü, bulunduğu ortamı güçlü UV-C ışınımı ile sterilize eder.
- 360° Kapsama Alanı: UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatürü, etrafını saran 3 tüp ile sterilizasyon sağlar.
- Tekerlekleri sayesinde kolay taşınabilir, pratik, sağlam ve kullanıcı dostu bir sterilizasyon cihazıdır.
- UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatürü, hareket sensörü sayesinde 5m mesafeye kadar hareketi algılar. Hareket algıladığında sterilizasyon otomatik olarak durur.

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: RGN-03
Çalışma Voltajı	: 220~240VAC 50/60Hz
Güç Tüketimi	: 95W
Işık Kaynağı	: UV-C Tüp
UV Dalga Boyu	: 254nm
Işıma Gücü	: 1,16W/m ² @1m
Hareket Sensörü Algı Mesafesi	: ~5m
Ölçüler	: Ø400x1450mm
Ağırlık	: 10kg
Diğer Özellikler	: Odayı terk etmek için gecikmeli işlem

Çalışma Adımları

1. Cihazı prize takın.
2. Uzaktan kumandanın "ON" tuşuna basın.
3. Cihaz etkinleştirildiğinde, cihazda sarı uyarı ışığı yanıp sönerken ve bip sesi çıkarırken, insanların ve evcil hayvanların odadan çıkması için 20 saniyeleri olacaktır.
4. Cihaz sterilizasyon işlemine başladığı zaman kırmızı uyarı ışığı yanacaktır.
5. Sterilizasyon işlemi tamamlandığında yeşil uyarı ışığı yanacaktır.
6. Sterilizasyon işlemi sırasında hareket algılanırsa, UV-C ışınım kesilecek ve sarı uyarı ışığı yanarken sesli uyarı duyulacaktır. Tespit edilen hareket, 5 saniyeden kısa süreli ve devamlı değil ise sterilizasyona devam edecektir.
7. Bu uyarıdan sonra 3. kez hareket algılandığında ise sistem tamamen kapanacaktır.
8. Sürekli yanıp sönen kırmızı ışık, sterilizasyon sırasında bir hareketin algılandığını ve işlemin tamamlanmadığını gösterir. Bu durumda sterilizasyon işlemi tekrarlanmalıdır.
9. Bip sesinden sonra 3 kez yanıp sönen sarı ve kırmızı ışıklar, sterilizasyonun son aşamalarında hareket algılama nedeniyle işlemin kesildiğini, ancak ortamın en az %90 oranında sterilize edildiğini gösterir. Bu durumda kullanıcı, sterilizasyonun tekrarlanıp tekrarlanmayacağına karar verebilir.
10. Cihazın sterilizasyon süresi 1 saat olarak ayarlanmış olup bu süre sonunda 4 metre yarıçaplı alanı sterilize etmektedir.
11. Sterilizasyon süresi, oda büyüklüğüne göre ayarlanabilmektedir.
Sterilizasyon süresi ayarı için Sterilizasyon Süresi bölümünü inceleyiniz.
12. Güç kablosunu, kablo sarma aparatına sarabilirsiniz.

Sterilizasyon Süresi

- Sterilizasyon süresi, fabrika çıkışında 1 saat ayarlanmış şekilde kullanıcıya gönderilmiştir. Bu süre sonunda maksimum 4 metre yarıçaplı alan sterilize olmaktadır.
- Farklı büyüklükte kullanılacak alanlar için zaman ayarı yapılmalıdır. Bu durumda fabrikamızdan teknik destek almanız gerekmektedir. Teknik destek için;

teknikdestek@ttaf.com.tr



UYARILAR



1. Kesinlikle alıřtırma talimatlarına bakınız.
2. Ürünü sökmeyin veya kendi başınıza herhangi bir parayı deęiřtirmeyin.
3. Dezenfeksiyon sürecinde UV ışınımdan kaçınmak için lütfen insan, hayvan ve bitkileri alandan uzaklařtırdığınızdan emin olun.
4. Gözlerinize ve cildinize zarar vermemek için lütfen alıřırken ışığa bakmayın. UV-C ışınlarına maruz kalmak hem hayvan hem de insan saęlığı için son derece zararlıdır. Kalıcı rahatsızlıklara neden olabilir.
5. Ürüne arpmayın veya düşürmeyin, aksi takdirde ürüne veya lamba tüpüne zarar verebilir.
6. Cihaz yere düşme, kırılma, doęal afette zarar görme ya da herhangi bir darbeye maruz kalma durumları ile karřılařtığı zaman ürünün paracıklarına el sürülmeden ve teneffüs edilmeden atıkları dikkatli bir řekilde fıra yardımı ile toplanarak pořete konulmalı ve alan havalandırılmalıdır. **20 01 21** kodlu (Floresan Lamba ve Dięer Civa İçeren Atıklar) atık kutusu oluşturularak dięer atıklardan ayrılması gerekmektedir.
7. Tehlikenin ana kaynaęı tüplerde bulunan civa buharıdır. Tüp kırıldığı zaman hemen buharlařır. Tüp başına 3 mg'a kadar civa kullanılmıřtır.
8. Bu ürün elektrikli bir üründür, lütfen elektrik güvenliğine dikkat edin.

Dikkat



1. Gü açıksa ancak ışık alıřmıyorsa, lütfen elektrik fiřinin gü kaynağına doęru řekilde baęlanıp baęlanmadığını kontrol edin.
2. Lütfen bu ürün için doęru giriř voltajını sein.
3. Lütfen ürünü sabit olmayan, yanıcı veya nemli yerlerde kullanmayın.
4. Bu üründe anormal bir durum olduęunda, lütfen hemen gü kaynağını kesin ve firmamıza bařvurun.
5. Elektrik arpmasını önlemek için yüksek voltajlı AC fiřini nemli veya ıslak bir yere koymayın.
6. UV-C tüpün kullanım ömrü 8000 saatten fazladır. UV-C tüp deęiřimi için firmamızdan teknik destek almanız gerekmektedir. Teknik destek için;

teknikdestek@ttaf.com.tr



Kavaklı Mh. İstanbul Cd. No:21
Beylikdüzü -İstanbul /TÜRKİYE

Tel : +90 212 855 82 20 (Pbx)

Fax : +90 212 855 82 21

www.ttafmedikal.com

    /ttafelectronic