



MİNİ STERİLİZASYON KUTUSU
DB-060-B-UVC
KULLANMA KILAVUZU



Temel Özellikler

- UV-C LED Sterilizasyon Çantası, UV-C ışınları sayesinde etkili sterilizasyon sağlar.
- Sterilizasyon süresi 3 dakikadır.
- Radyasyon, ozon, su ve kimyasal olmadan sterilizasyon sağlar.
- UV-C LED ve 360° kapsama alanı sağlayan reflektörler ile eşyalarınızın tüm yüzeylerini sterilize eder.
- Portatif tasarımı sayesinde evde, ofiste, hastanelerde, iş yerlerinde, otellerde vb. kullanım için idealdir.

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: DB-060-B-UVC
Adaptör Giriş Değeri	: 200~240VAC 50/60Hz
Adaptör Çıkış Değeri	: 5V DC 1.5A
Güç Tüketimi	: 10W
Işık Kaynağı	: UV-C LED
UV Dalga Boyu	: 265~285nm
Çalışma Süresi	: 180s
İç Ölçüler	: 320x250x50mm
Dış Ölçüler	: 335x265x110mm
Ağırlık	: 1600g

Paket İçeriği

- I. Sterilizasyon Çantası
- II. Adaptör
- III. UV Koruyucu Gözlük

Çalıřma Adımları

1. Cihazın adaptörünü prize takın.
2. Cihazın kapađını açın ve sterilize etmek istediđiniz ürünü cihazın içine yerleřtirin.
3. Cihaz üzerinde bulunan açma-kapama düđmesine basın.
4. Sterilizasyon işlemleri 3 dakika sonunda bitecek ve cihaz otomatik kapanacaktır.
5. Sterilizasyon işlemleri sırasında cihaz kapađı açılırsa, UV-C ışınım kesilecek ve kapak kapandıđı anda sterilizasyona devam edecektir.



- UV-C ışınlarına maruz kalmak hem hayvan hem de insan sađlıđı için son derece zararlıdır.
- Cildinizi ve gözlerinizi UV ışığına maruz bırakmayınız. Kalıcı rahatsızlıklara neden olabilir.



Kavaklı Mh. İstanbul Cd. No:21
Beylikdüzü -İstanbul /TÜRKİYE

Tel : +90 212 855 82 20 (Pbx)

Fax : +90 212 855 82 21

www.ttafmedikal.com

    /ttafelectronic