

## DB-015-B-UVC-1

## MINI Sterilizasyon Kutusu

**Ultraviyole-C Sterilizasyon Kutusu Ultraviyole-C ışınları ile bakteri ve virüslere karşı %99,9 etkilidir.**



● Aç-Kapa butonu

● UV-C Lamba

Sterilizasyon Yöntemi: **UVC**

Sterilizasyon Süresi: **5 Dakika**

UV Işın Dalga Boyu: **253.7 nm**

Ozon Yoğunluğu: **>=0.01ppm <=0.05ppm**

Batarya Kapasitesi : **1200 mAh**

Toplam Çalışma Süresi: **10000 saat**

### UVC Lamba sterilizasyonu ne kadar etkilidir?

UVC sterilizasyonu profesyonel bir teknoloji olarak bakteri ve virüslerin DNA ve RNA'larını tahrip ederek çoğalmalarını engeller.

Deli dana virüsü gibi ısıya dayanıklı, kuş gribi virüsü gibi soğuğa dayanıklı ve süper bakteri gibi ilaca dayanıklı birçok bakteri vardır. UV ışınlarına karşı dayanıklı bakteri henüz bulunmadı.

*Not: Cildinizi ve gözlerinizi UV ışığına maruz bırakmayın.*

- **360° Kapsama Alanı:** %99,9 oranında sterilizasyon sağlayan UVC UVC lambaları ve 360° kapsama alanı sağlayan reflektör ile eşyalarınızın tüm yüzeylerini sterilize eder.
- **Portatif Tasarım:** Evde, ofiste, otelde, kafede vb. kullanım için idealdir.
- **Çok Amaçlı Kullanım:** Gözlük, güneş gözlüğü, anahtarlık, kalem, saat, maske, makyaj malzemeleri, manikür seti, kişisel bakım aletleri, para, takı vb. günlük aksesuarlarınızın sterilizasyonu için uygundur.
- **Güvenli:** Sterilizasyon işlemi 5 dakikada tamamlandıktan sonra otomatik kapanma özelliği devreye girer. Özel güvenlik koruması sayesinde çalışma durumunda kapak 30 dereceden fazla açılırsa UV-C lambası otomatik olarak durur. Kapak tekrar 30 dereceden az olduğunda, UV-C lambası otomatik olarak yanar. Böylece cildin ve gözlerin UVC ışınlarına maruz kalması engellenmiş olur.
- **Kolay Kullanım:** Sterilizasyon kutusunu açın, eşyayı kutunun içine yerleştirin. Kutu içerisinde bulunan cihazdaki güç açma/kapama düğmesine 3 saniye basılı tutun, cihaz 3 kez "Bip" sesi verecektir. Otomatik zamanlama 5 dakika çalışacak ve "Bip" sesinden sonra otomatik duracaktır. 5 dakikada %99,9 oranında sterilizasyon işlemi sağlanır.
- **Lamba gösterge ışığı** şarj ederken kırmızı ve tamamen sarj olduğunda yeşil olacaktır.

### Neden UVC Lamba Mini Sterilizasyon Kutusu?


- Ufak ve ergonomik tasarımıyla rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Seyahat halindeyken ihtiyacınız olduğu anda kullanabilirsiniz.



ttafmedikal.com  
medikal@ttaf.com.tr



ttafelectronic

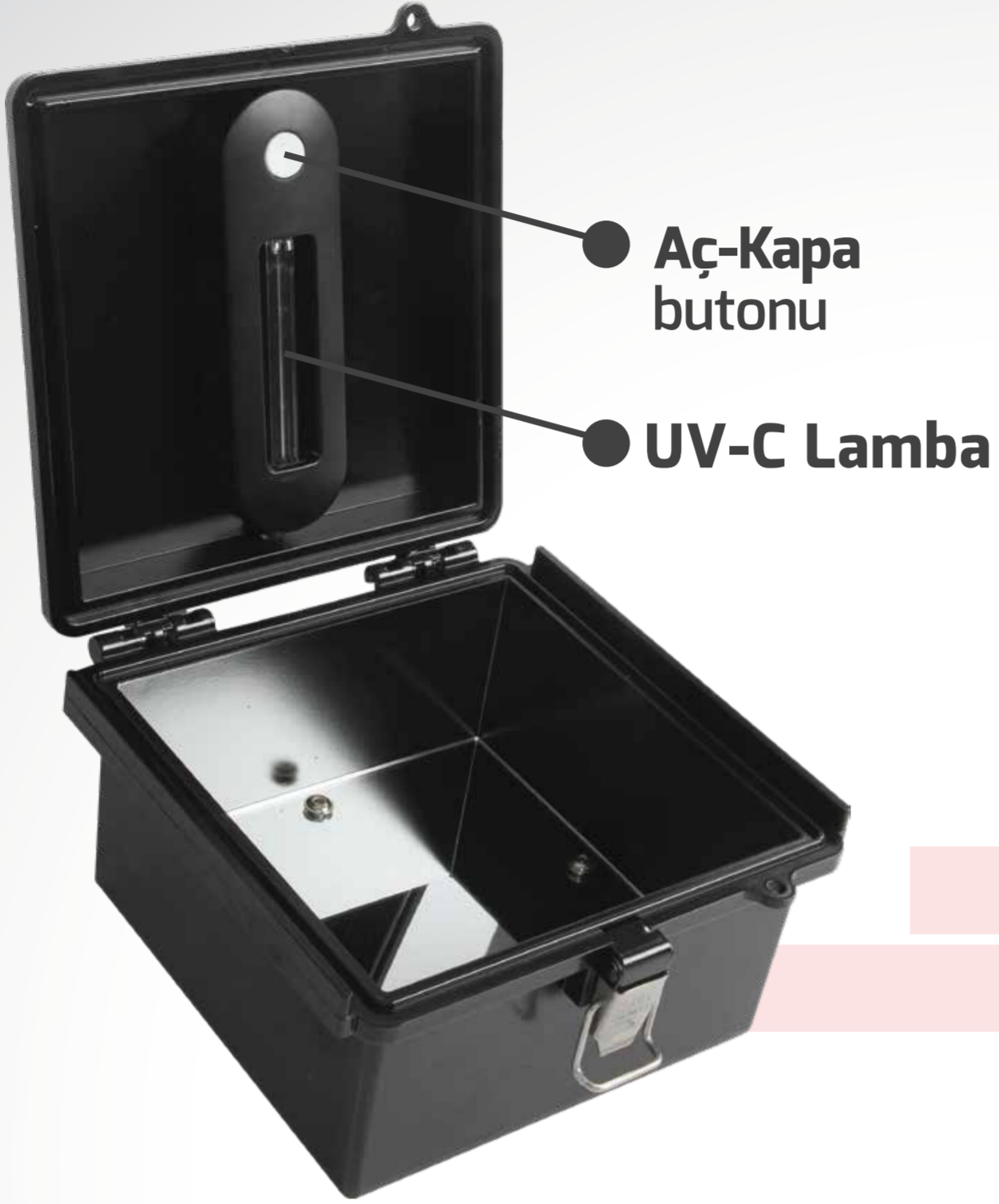

## MINI Sterilizasyon Kutusu

**Ultraviyole-C Sterilizasyon Kutusu**  
Ultraviyole-C ışınları ile bakteri ve virüslere karşı %99,9 etkilidir.

Sterilizasyon Yöntemi: **UV-C**

Sterilizasyon Süresi: **5 Dakika**

UV Işın Dalga Boyu: **265~285nm**

### DB-015-B-UVC-1

Adaptör Giriş Değeri	Çalışma Süresi
100~240VAC 50/60Hz	300s
Adaptör Çıkış Değeri	İç Ölçüler
5V DC 2A	125x125x60mm
Güç Tüketimi	Dış Ölçüler
3W	150x150x89mm
Işık Kaynağı	Ağırlık
UV-C Lamba	495g
UV Dalga Boyu	Batarya Kapasitesi
265~285nm	1200mAh



ttafelectronic

ttafmedikal.com  
medikal@ttaf.com.tr