



TTAF[®]

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

**UVC LED STERİLİZASYON ÇANTASI
DB-330-G-UVC
KULLANMA KILAVUZU**



Temel Özellikler

- UV-C LED Sterilizasyon Çantası, UV-C ışınları sayesinde etkili sterilizasyon sağlar.
- Sterilizasyon süresi 3 dakikadır.
- Radyasyon, ozon, su ve kimyasal olmadan sterilizasyon sağlar.
- UV-C LED ve 360° kapsama alanı sağlayan yansıtıcı ayna ile eşyalarınızın tüm yüzeyini sterilize eder.
- Portatif tasarımı sayesinde evde, ofiste, hastanelerde, iş yerlerinde, otellerde vb. kullanım için idealdir.

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: DB-330-G-UVC
Çalışma Voltajı	: 200~240VAC 50/60Hz
Güç Tüketimi	: 38W
Işık Kaynağı	: UV-C LED
UV Dalga Boyu	: 265~285nm
Çalışma Süresi	: 180s
Çanta Malzemesi	: PP
İç Ölçüler	: 463x338x110mm
Dış Ölçüler	: 530x400x180mm
Ağırlık	: 3700g

Paket İçeriği

- I. Sterilizasyon Çantası
- II. Güç Kablosu
- III. UV Koruyucu Gözlük

Çalıřma Adımları

1. Cihazı, prize takın.
2. Cihazın kapađını aın ve sterilize etmek istediđiniz rn cihazın iine yerleřtirin.
3. Cihaz zerinde bulunan ama-kapama dđmesine basın.
4. Sterilizasyon iřlemi 3 dakika sonunda bitecek ve cihaz otomatik kapanacaktır.
5. Sterilizasyon iřlemi sırasında cihaz kapađı aılırsa, UV-C iřınım kesilecek ve kapak kapandıđı anda sterilizasyona devam edecektir.



- UV-C iřınlarına maruz kalmak hem hayvan hem de insan sađlıđı iin son derece zararlıdır.
- Cildinizi ve gzlerinizi UV iřıđına maruz bırakmayınız. Kalıcı rahatsızlıklara neden olabilir.



TTAF[®]

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Kavaklı Mh. İstanbul Cd. No:21
Beylikdüzü -İstanbul /TÜRKİYE

Tel : +90 212 855 82 20 (Pbx)

Fax : +90 212 855 82 21

www.ttafmedikal.com

    /ttafelectronic