



**TTAF**<sup>®</sup>

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

**MİNİ STERİLİZASYON KUTUSU**  
**DB-015-B-UVC-1**  
KULLANMA KILAVUZU



## Temel Özellikler

- UV-C Lamba Sterilizasyon Çantası, UV-C ışınları sayesinde etkili sterilizasyon sağlar.
- Sterilizasyon süresi 5 dakikadır.
- UV-C Lamba ve 360° kapsama alanı sağlayan reflektörler ile eşyalarınızın tüm yüzeylerini sterilize eder.
- Portatif tasarımı sayesinde evde, ofiste, hastanelerde, iş yerlerinde, otellerde vb. kullanım için idealdir.
- Cihazın batarya özelliği sayesinde isteğiniz ortamda kullanabilirsiniz

## Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: DB-015-B-UVC-1
Adaptör Giriş Değeri	: 100~240VAC 50/60Hz
Adaptör Çıkış Değeri	: 5V DC 2A
Güç Tüketimi	: 3W
Batarya Kapasitesi	: 1200mAh
Işık Kaynağı	: UV-C Lamba
UV Dalga Boyu	: 253.7nm
Çalışma Süresi	: 300s
İç Ölçüler	: 125x125x60mm
Dış Ölçüler	: 150x150x89mm
Ağırlık	: 495g

## Paket İçeriği

- I. Sterilizasyon Çantası
- II. Adaptör
- III. UV Koruyucu Gözlük

## Çalıřma Adımları

1. Cihazın kapađını aın ve sterilize etmek istediđiniz rn cihazın iine yerleřtirin.
2. Cihazın iinde bulunan ama-kapama dđmesine 3 saniye basılı tutun.
3. Cihazdan 3 kez "Bip" sesi gelecektir.
4. Sterilizasyon iřlemi 5 dakika sonunda bitecek ve cihaz uyarı sesi verip otomatik kapanacaktır.
5. Sterilizasyon iřlemi sırasında cihaz kapađı aılırsa, UV-C ıřınım kesilecek ve kapak kapandıđı anda sterilizasyona devam edecektir.
6. Cihazın sarđı bittiđi zaman adaptr ile sarđ edin.
7. Cihaz sarđ olurken kırmızı gsterge ıřıđı yanacaktır.  
Cihaz tamamen sarđ olduđu zaman yeřil gsterge ıřıđı yanacaktır.



**Dikkat UV-C Iřık**



- UV-C ıřınlarına maruz kalmak hem hayvan hem de insan sađlıđı iin son derece zararlıdır.
- Cildinizi ve gzlerinizi UV ıřıđına maruz bırakmayınız. Kalıcı rahatsızlıklara neden olabilir.



Kavaklı Mh. İstanbul Cd. No:21  
Beylikdüzü -İstanbul /TÜRKİYE

Tel : +90 212 855 82 20 (Pbx)

Fax : +90 212 855 82 21

[www.ttafmedikal.com](http://www.ttafmedikal.com)

    /ttafelectronic